

## Käyttöohje Artem Aladin -sterilisaattori

1. Aseta virtajohto verkkovirtaan ja avaa laitteen kansi.
2. Aseta steriloitavat työvälineet väljästi laitteen sisälle ja sulje kansi.
3. Laita laitteen virta päälle virtapainikkeesta, joka löytyy laitteen takaosasta.
4. Anna työvälineiden steriloitua n. 8 minuutin ajan. Sulje virta virtapainikkeesta ja poista tuotteet laitteesta. Huom! Jos kyseessä on esimerkiksi sakset tai koneen leikkausterä, toista käsittely toiselle puolelle.

### VAROITUKSET:

- Älä katso suoraan valoon ilman suojalaseja. Valo voi aiheuttaa vaurioita silmiin.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, älä käytä laitetta. Virtajohto tulee vaihtaa sähköalan ammattilaisella, jotta vältetään miltään riskeiltä.
- Älä käytä laitetta kylpyammeiden, pesualtaiden tai muiden nestettä sisältävien astioiden läheisyydessä.
- Lisäturvaa saat asentamalla vikavirtasuojan, jonka jäännösvirta ei ylitä 30 mA. Kysy asiasta lisää sähköalan ammattilaiselta.
- Vaihtolampun tulee olla tyyppiä Sankyo Denki GPX9 – 9W. Älä käytä laitteeseen sopimattomia lamppeja. Lisätietoa saat laitteen myyjältä.

Valmistaja:  
AGVGroup Industries

Maahantuoja  
Veijo Kinnunen Oy  
Kartanoherrantie 2 a  
02920 Espoo  
010 680 1000  
[info@kinnunen.fi](mailto:info@kinnunen.fi)  
[www.kinnunen.fi](http://www.kinnunen.fi)

